

# AllProMask **CLASSIC**



## 1. Händehygiene

Vor dem Anlegen der Maske die Hände gründlich waschen und desinfizieren.



## 2. Anlegen

Schlaufen über die Ohren ziehen. Blaue Seite außen tragen, Nasenbügel oben.




## 3. Anpassen

Maske entfalten, sodass sie Mund, Nase und Kinn dicht umschließt. Nasenbügel festdrücken.



## 4. Anwendung

Maske max. 8 Std. tragen. Maskenkörper nicht mehr mit den Händen berühren.

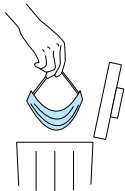

## 4. Entsorgen

Nach einmaligem Gebrauch und bei Durchfeuchtung fachgerecht entsorgen. Nur an den Schlaufen berühren.



## 4. Händehygiene

Nach dem Abnehmen und Entsorgen der Maske die Hände gründlich waschen und desinfizieren.